



## POUČENÍ PRO LÉKAŘE – ANEB JAK VŠE UDĚLAT SPRÁVNĚ

### Získejte odběrovou sadu a přepravní box.

- Sadu pro odběr a přepravu krve získáte vyplněním **on-line objednávkového formuláře**, nebo na **telefonním čísle +420 724 748 308**, nebo na **emailu: info@prenatalsafe.cz**.
- V sadě naleznete [Žádost o provedení testu](#), [Informovaný souhlas](#) a [Poučení pro klienty podstupující NIPT](#).

### Objednejte pacientku.

- Objednejte pacientku na odběr krve. Zavolejte nebo napište na jeden z výše uvedených kontaktů a my zařídíme kurýra, který si od Vás převezme zásilku s odebranou krví.

### Zkontrolujte platbu.

- Předejte pacientce poučení o platbě. Platba může proběhnout bankovním převodem, nebo vložení na účet.
- Cena testu **PrenatalSafe 5** je **12 500 Kč / 500 EUR** za standardní test. Test **PrenatalSafe Plus**, který navíc testuje chromozomy 9 a 16 a mikrodelece stojí **14 500 Kč / 600 EUR**. **PrenatalSafe KARYO** je nabízen za **19 900 Kč / 800 EUR**. **PrenatalSafe KARYO Plus** pak za **22 900 Kč / 900 EUR**.
- Nově nabízíme test **GeneSafe Inherited**, který odhalí vrozená genetická onemocnění způsobená mutací v genu a to za **18 900 Kč / 750 EUR**. **GeneSafe De Novo**, který je určen pro detekci onemocnění nezděděných od rodičů, rovněž za **18 900 Kč / 750 EUR**. Kombinací testu GeneSafe Inherited a GeneSafe De Novo je pak **GeneSafe Complete** za **22 900 Kč / 900 EUR**. Další test **PrenatalSafe Complete**, představuje spojení testů PrenatalSafe KARYO a GeneSafe Complete a je nabízen za **27 900 Kč / 1100 EUR**. Nejobsáhlejším testem je **PrenatalSafe Complete Plus**, který spojuje test PrenatalSafe KARYO Plus a GeneSafe Complete a je nabízen za **29 900 Kč / 1200 EUR**.
- Ke každému vyšetření je možné ZDARMA přidat testování **RhSafe**, tedy detekci Rh faktoru.
- V případě zájmu nabízíme také **neinvazivní určení otcovství – PaternitySafe**, a to jak pro 2 profily (**9900 Kč / 400 EUR**) nebo i pro 3 profily (**12900 Kč / 500 EUR**), kde vstupuje do analýzy náhradní matka.
- Před odběrem krve zkontrolujte platbu pacientky! Doklad o úhradě může pacientka odeslat na email: [info@prenatalsafe.cz](mailto:info@prenatalsafe.cz) nebo předložit potvrzení o úhradě bankovním převodem či vložení peněz na účet.

### Předejte k podpisu Informovaný souhlas.

- Předejte pacientce k podpisu [Informovaný souhlas](#) a zodpovězte případné otázky. Vše zkontrolujte! Podpis je nezbytný pro provedení testu!

**GENPROGRESS, s.r.o.**

Studentská 812/6  
Brno, 625 00,  
Česká republika

[info@prenatalsafe.cz](mailto:info@prenatalsafe.cz)

+420 724 748 308, +420 607 922 818



## Vyplňte s pacientkou žádanku.

- Vyplňte společně s pacientkou [Žádost o provedení testu](#).
- Pamatujte, že pacientka si může vybrat, zda chce znát pohlaví dítěte. Také si může vybrat z několika variant testu:
  - **PrenatalSafe 5** (chromozomy 21, 18, 13, X a Y)
  - **PrenatalSafe Plus** (PrenatalSafe 5 + testování mikroleleci + chr. 9 a 16)
  - **PrenatalSafe KARYO** (testování početních a strukturních aberací všech chr.)
  - **PrenatalSafe KARYO Plus (spojení testů KARYO a Plus)**
  - **GeneSafe Inherited** (detekce vrozených genetických onemocnění způsobených mutací v genu – Cystická fibróza, Srpkovitá anémie, Beta Thalasemie, Dědičná hluchota)
  - **GeneSafe De Novo** (detekce onemocnění nezděděných od rodičů)
  - **GeneSafe Complete (spojení testů GeneSafe Inherited a GeneSafe De Novo)**
  - **PrenatalSafe Complete (spojení testů PrenatalSafe KARYO a GeneSafe Complete)**
  - **PrenatalSafe Complete Plus (spojení testů PrenatalSafe KARYO Plus a GeneSafe Complete)**
- Požádejte pacientku, aby žádanku podepsala. Zkontrolujte podpisy. **Podpis tohoto dokumentu je nezbytný pro provedení testování na odebraném vzorku krve.**

## Odeberte krev.

- Z přepravního boxu vyjměte zkumavku.
- Na etiketu zkumavky napište **jméno a příjmení pacientky a její datum narození**.
- Odeberte do zkumavky 8-10 ml periferní krve tak aby byla zkumavka téměř plná
- Zkumavku 5-10krát promíchejte (dnem vzhůru a zase zpět).
- **Odebranou krev vždy skladujte při pokojové teplotě, nikdy neskladujte zkumavky v lednici nebo v mrazáku!**

## Uzavřete box a odešlete kurýrem.

- Zkumavku vložte do přepravního boxu s logem PrenatalSafe®.
- Do přepravního boxu přidejte podepsané dokumenty ([Žádost o provedení testu](#), [Informovaný souhlas](#)). Box zavřete a vyčkejte na kurýra.
- Předajte kurýrovi box společně s přepravním listem, který jste od nás obdrželi emailem.

## Odešlete informace o odběru a vyčkejte na výsledek.

- Na [info@prenatalsafe.cz](mailto:info@prenatalsafe.cz) zašlete informaci o odeslání vzorku připojte informace 1. jméno pacientky 2. datum narození 3. datum odběru 4. doklad o úhradě testu pacientky
- Do 3-7 pracovních dnů od obdržení vzorku laboratoří Vám budou zaslány výsledky.